

## Gatavs lietošanai dezinfektants alkoholu izturīgām virsmām

- Paliekošais antimikrobu efekts līdz pat 10 dienām
- efektīvs pret koronavīrusu
- ar patīkamu smaržu
- eksekventa ādas panesamība



### Pielietojums

**Bacoban** ir lietošanai gatavs šķīdums alkoholu izturīgu virsmu dezinfekcijai ar paliekošu antimikrobu efektu

### Lietošanas norādījumi

Izsmidzināt apmēram 50 ml (maks. 80 ml) Bacoban® uz m<sup>2</sup> virsmas, izkļiedēt ar drānu un ļaut nožūt. Nelietot uz lielām virsmām.

Jutīgu virsmu gadījumā, mēs rekomendējam testēt savietojamību nenožīmīgās vietās.



### Sastāvdaļas

100 g šķīduma satur: etanolu 49,4 g, isopropanolu 7,1 g, benzalkonija hlorīdu 0,71 g, nātrija piritionu 0,05 g, polikondensātus, smaržvielas un attīrītu ūdeni.

Nesatur formaldehīdu. Nesatur fenolu.

### Uzglabāšana

Glabāt Bacoban® no +5 līdz +25°C. Sargāt no sala un tiešas saules gaismas.

### Iespējamie iepakojumi

Produkts	Iepakojumu vienība	
Bacoban® pudele	12 x 500 ml	BAC500
Bacoban® kanna	1 x 5 l	BAC5000

### Testa ziņojumi

Mūsu produkti tiek plaši pārbaudīti. Mēs priecājamies pēc pieprasījuma sniegt jums mūsu mikrobioloģiskos un dermatoloģiskos ziņojumus.

### Drošības ziņojums

Drošības datu lapas pieejamas pēc pieprasījuma.

**Svarīgi! Bacoban® paliekošais antimikrobu efekts** nav attaisnojums nepieciešamo dezinfekcijas pasākumu neveikšanai redzamas un/vai iespējamās kontaminācijas gadījumā

**Lietojiet dezinfektantu uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un produkta informāciju.**

Biocīdu reģ. No: N-23123

### Efektivitāte

Testēšana saskaņā ar DVV / RKI vadlīnijām	eksponēšanas laiks
Virucīda aktivitāte pret apvalkotiem vīrusiem (iesk. koronavīrusu, HIV, HBV, HCV, gripu, herpes, ebolavīrusu....)	30 s
Rotavīruss	15 s
Adenovīruss	1 min
Norovīruss	120 min
Testēšana saskaņā ar DGHM vadlīnijām	
baktericīds	5 min
pret sēnīšu	5 min
mikobaktericīds	15 min
EN vadlīnijas:	
EN 1040 (baktericīds)	5 min
EN 1275 (pret sēnīšu)	5 min
EN 1276 (baktericīds)	5 min
EN 1650 (pret sēnīšu)	15 min
EN 14348 (tuberkulozīds)	15 min

**Paliekošais antimikrobu efekts līdz pat 10 dienām (testēts saskaņā ar ASTM E 2180).**

Dermatoloģiski testēts (epikutānais tests ar 30 testa personām): eksekventa ādas panesamība.

Biosaderīgs saskaņā ar DIN EN ISO 10993

## Bezalkohola dezinfekcija un tīrīšana

- Paliekošs antimikrobu efekts līdz pat 10 dienām
- VAH reģistrēts
- efektīvs pret koronavīrusu
- ekselenta ādas panesamība
- labs tīrīšanas efekts
- praktiskā pielietojamība pārbaudīta 4 laukumu testā



VAH-listed



dermatest-guarantee.de



### Pielietojums

**Bacoban WB® ir uz ūdeni bāzēts koncentrāts kombinētai inventāra un grīdu dezinfekcijai un tīrīšanai ar paliekošu antimikrobu efektu.**

### Lietošanas norādījumi

Sagatavot lietošanai gatavu šķīdumu no BacobanWB® saskaņā ar sajaukšanas tabulu un pietiekami samitrināt virsmu. Neskalot vai nenošlaucīt sausu.

Gala tilpums	Sajaukšanas tabula			
	0,5 %	1 %	2 %	3 %
<b>1 Litrs</b>	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml
<b>2 Litri</b>	1 ml	20 ml	40 ml	60 ml
<b>4 Litri</b>	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml
<b>8 Litri</b>	40 ml	80 ml	160 ml	240 ml
<b>10 Litri</b>	50 ml	100 ml	200 ml	300 ml

**Paliekošais antimikrobu efekts līdz pat 10 dienām (testēts saskaņā ar ASTM E 2180).**  
Dermatoloģiski testēts (\*pie 1 %): ekselenta ādas panesamība.

### Uzglabāšana

Glabāt Bacoban®WB no +5 līdz +25°C. Sargāt no sala un tiešas saules gaismas.

### Iespējamie iepakojumi

Produkts	Iepakojuma vienība	
Bacoban®WB Bottle	6 x 1 l	BACWB1D
Bacoban®WB Canister	1 x 5 l	BACWB5

### Testa ziņojumi

Mūsu produkti tiek plaši pārbaudīti. Mēs priecājamies pēc pieprasījuma sniegt jums mūsu mikrobioloģiskos un dermatoloģiskos ziņojumus.

### Drošības ziņojums

Drošības datu lapas pieejamas pēc pieprasījuma.

**Svarīgi! Bacoban®WB paliekošais antimikrobu efekts nav attaisnojums nepieciešamo dezinfekcijas pasākumu neveikšanai redzamas un/vai iespējamās kontaminācijas gadījumā!**

### Sastāvdaļas

100 g šķīduma satur: benzalkonija hlorīdu 26 g, nātrija piritionu 2,5 g, polikondensātus, smaržvielas, attīrītu ūdeni.

Sastāvdaļas saskaņā ar regulu (EC) No 648/2004: 15 % vai vairāk bet ne vairāk kā 30 % katjonu virsmaktīvās vielas, dezinfektants, smaržas (Linalool, Limone, Citral, Geraniol, Citronello). Nesatur formaldehīdu. Nesatur fenolus.

### Efektivitāte

šķīdums ekspozīcijas laiks


Testēšana saskaņā ar EN14476 un DVV / RKI vadlīnijām		
Virucīda aktivitāte pret apvalkotiemiem vīrusiem ( <b>koronavīruss, HIV, HBV, HCV, gripa, herpes, Ebolavīruss...</b> )	1,00%	5 min
Adenovīruss	2,00%	240 min
Cilvēka papilomas vīruss (HPV)	1,00%	60 min
Norovīruss	1,00%	30 min
Rotavīruss	0,10%	5 min
VAH reģistrā (testēts saskaņā ar VAH vadlīnijām 2015)		
baktericīds un pret rauga sēņu	1,00%	5 min
EN vadlīnijas		
EN 1040 (baktericīds)	0,25%	5 min
EN 1275 (pret rauga sēņu)	0,25%	5 min
EN 1276 (baktericīds)	0,75%	5 min
	0,50%	15 min
EN 13727 (baktericīds)	1,00%	5 min
EN 13624 (pretsēņu, tai skaitā rauga)	1,00%	5 min
EN 1650 (pret rauga sēņu)	0,50%	5 min
	0,25%	15 min
EN 13697 (baktericīds)	0,50%	15 min
EN 14561 (baktericīds)	3,00%	5 min
	0,50%	60 min
EN 14562 (pret rauga sēņu)	0,50%	60 min
EN 16615 (baktericīds, pretrauga sēņu) (4 lauku tests)	1,00%	5 min

**Lietojiet dezinfektantu uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un produkta informāciju.**

Biocīdu reģ. LV29032021/2563

## Lietošanai gatavs šķīdums virsmu dezinfekcijai un tīrīšanai

- Paliekošs antimikrobu efekts līdz pat 10 dienām
- efektīvs pret koronavīrusu
- ekselenta ādas panesamība
- augsts tīrīšanas efekts
- praktiskā pielietojamība pārbaudīta 4 laukumu testā

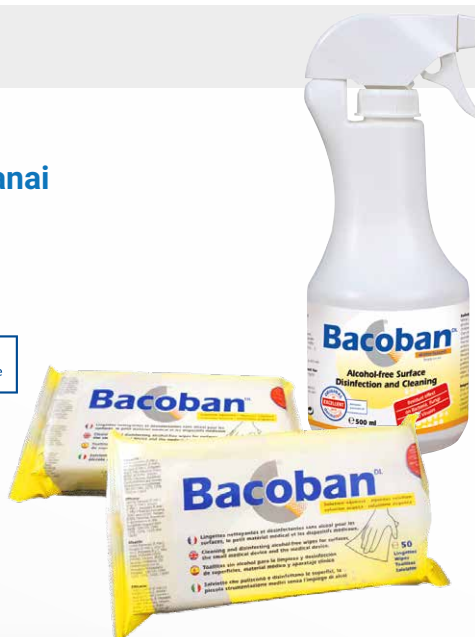

### Pielietojums

**Bacoban DL ir lietošanai gatavs uz ūdeni bāzēts šķīdums** virsmu dezinfekcijai un tīrīšanai ar paliekošu antimikrobu efektu.

### Lietošanas norādījumi

Uzklāt Bacoban DL uz virsmas un vienmērīgi izkliedēt ar salveti; attiecīgi izņemt no iepakojuma lietošanai gatavu salveti un vienmērīgi uzklāt šķīdumu uz virsmas. Tad ļaut nožūt. Neskalot vai nenoslaucīt sausu

### Efektivitāte

Testi saskaņā ar EN14476 un DVV / RKI vadlīnijām **ekspozīcijas laiks**

Virucīda aktivitāte pret apvalkotiemiem vīrusiem (iesk. koro-5 min navīrusu, HIV, HBV, HCV, gripu, herpes, Ebolas vīrusu...)

Rotavīrusu 5 min

Norovīrusu 30 min

Cilvēka papilomas vīrusu (HPV) 60 min

### VAH reģistrā (testēts saskaņā ar VAH vadlīnijām 2015)

baktericīds un pretrauga sēņu 5 min

### EN vadlīnijas

EN 1040 (baktericīds) 5 min

EN 1275 (pret rauga sēņu) 5 min

EN 1276 (baktericīds) 5 min

EN 13727 (baktericīds) 5 min

EN 13624 (pretsēņu, tai skaitā rauga) 5 min

EN 1650 (pret rauga sēņu) 5 min

EN 13697 (baktericīds) 15 min

EN 14561 (baktericīds) 60 min

EN 14562 (pret rauga sēņu) 60 min

EN 16615 (baktericīds, pret rauga sēņu) (4 lauku tests) 5 min

**Paliekošs antimikrobu efekts līdz pat 10 dienām (testēts saskaņā ar ASTM E 2180).**

Dermatoloģiski testēts (epikutānais tests ar 30 testa personām): ekselenta ādas panesamība.

### Sastāvdaļas

100 g šķīduma satur: benzalkonija hlorīdu 0,26 g, nātrija piritionu 0,025 g, polikondensātus, smaržvielas, attīrītu ūdeni.

Sastāvdaļas saskaņā ar regulu (EC) No 648/2004: ne vairāk kā 5 % katjonu virsmaktīvo vielu, dezinfektants, smaržas. Nesatur formaldehīdu. Nesatur fenolus.

### Uzglabāšana

Glabāt Bacoban® DL no +5 līdz +25°C. Sargāt no sala un tiešas saules gaismas.

### Iespējamie iepakojumi

Produkts	Iepakojuma vienība	
Bacoban®DL pudele	12 x 500 ml	BAC500DL
Bacoban®DL salvetes	16 x 50 gab	BACDLTUE

### Testa ziņojumi

Mūsu produkti tiek plaši pārbaudīti. Mēs priecājamies pēc pieprasījuma sniegt Jums mūsu mikrobioloģiskos un dermatoloģiskos ziņojumus.

### Drošības ziņojums

Drošības datu lapas pieejamas pēc pieprasījuma.

**Svarīgi! Bacoban® DL paliekošais antimikrobu efekts** nav attaisnojums nepieciešamo dezinfekcijas pasākumu neveikšanai redzamas un/vai iespējamās kontaminācijas gadījumā!

**Lietojiet dezinfektantu uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un produkta informāciju.**

Biocīda reģ. LV29032021/2563